



Notice utilisation des boutons préleveurs TST

Contact GDS 64: Mathilde ANDRE
Document source: Allflex



Si vous devez utiliser des boucles BVD, mais qu'il vous reste des boucles "classiques", vous pouvez commander, auprès du GDS 64, des boutons préleveurs, pour pouvoir donner un statut à votre veau concernant la BVD.

Questions fréquentes

-> **Comment fonctionnent ces boutons ?**

Les prochaines diapositives vont vous expliquer, pas à pas comment, ces utiliser ces boutons.

-> **Quelle pince dois-je utiliser ?**

Il faut utiliser la pince BVD, celle qui s'utilise avec les boucles BVD (jaune et noir), elle se commande auprès de l'EDE, sur le bon de commande de boucles :

Punto Com: 06 42 3	MATÉRIEL:			
	- Pince pour poser les boucles:	classique	<input type="checkbox"/>	pour kit de prélèvement BVD <input checked="" type="checkbox"/>
	- Pointeau de recharge:	classique	<input type="checkbox"/>	pour pince BVD <input type="checkbox"/>
MODE DE RÉGLEMENT: (Palement à la commande)				



Question fréquentes

-> Quel est le tarif ?

Le GDS est facturé par Allflex . Nous vous refacturons par la suite à prix coutant : 2,71 € HT / boutons (les frais d'envoi des échantillons au laboratoire sont compris dans ce coût) et 6,34 € HT pour les frais de livraison des boutons chez vous.

-> Comment faire la commande ?

Par mail au GDS : gds64@reseaugds.com . Dans le mail, il faut indiquer le numéro à **10 chiffres** de toutes les boucles classiques qu'il vous reste, ainsi que votre **numéro EDE**. S'il vous reste une suite de chiffres, vous pouvez nous donner le premier et le dernier. Exemple de mail :

"Merci de commander des boutons correspondants aux boucles N° 6415152002 à 6415152030 pour l'EDE 64123123".

Lorsque votre commande sera prise en compte, vous recevrai un mail qui accuse réception.

-> Puis-je boucler et déclarer mes veaux avant d'avoir reçu les boutons ?

Il peut s'écouler trois semaines entre votre commande et la livraison des boutons. Si vous avez des naissances entre temps, vous pouvez utiliser les boucles classiques pour boucler vos veaux, les déclarer, et utiliser les boutons préleveurs quand vous les aurez reçu.

Notice prise d'échantillon : source

1. Préparation de la boucle de prélèvement :

① Pièce mâle de prélèvement
(Bouton + aiguille)

② Pièce femelle

③ Tube de prélèvement



Avant prélèvement, vérifier que les numéros situés sur les boucles, l'aiguille et le tube sont identiques.

Mise en place de la pièce mâle : ①



Appuyer sur le verrou situé sur le côté de la pince.
Insérer la pièce mâle ① et relâcher le verrou.

Mise en place de la pièce femelle : ②



Appuyer sur la pédale.
Insérer la pièce femelle ②.
Relâcher la pédale.

Ne pas retirer le
capuchon vert



Vous pouvez
maintenant percer
l'oreille du veau



Une fois l'oreille percée, l'aiguille métallique, avec, à l'intérieur, un échantillon de l'oreille du veau, reste sur la partie noire de la pince.



Prendre le tube en plastique correspondant au N° de l'animal.




Positionner le tube sur l'aiguille métallique.

Fermer la pince délicatement jusqu'à entendre un petit « click ».




Puis, appuyer sur le verrou entouré  pour sortir l'ensemble : aiguille métallique et tube en plastique.

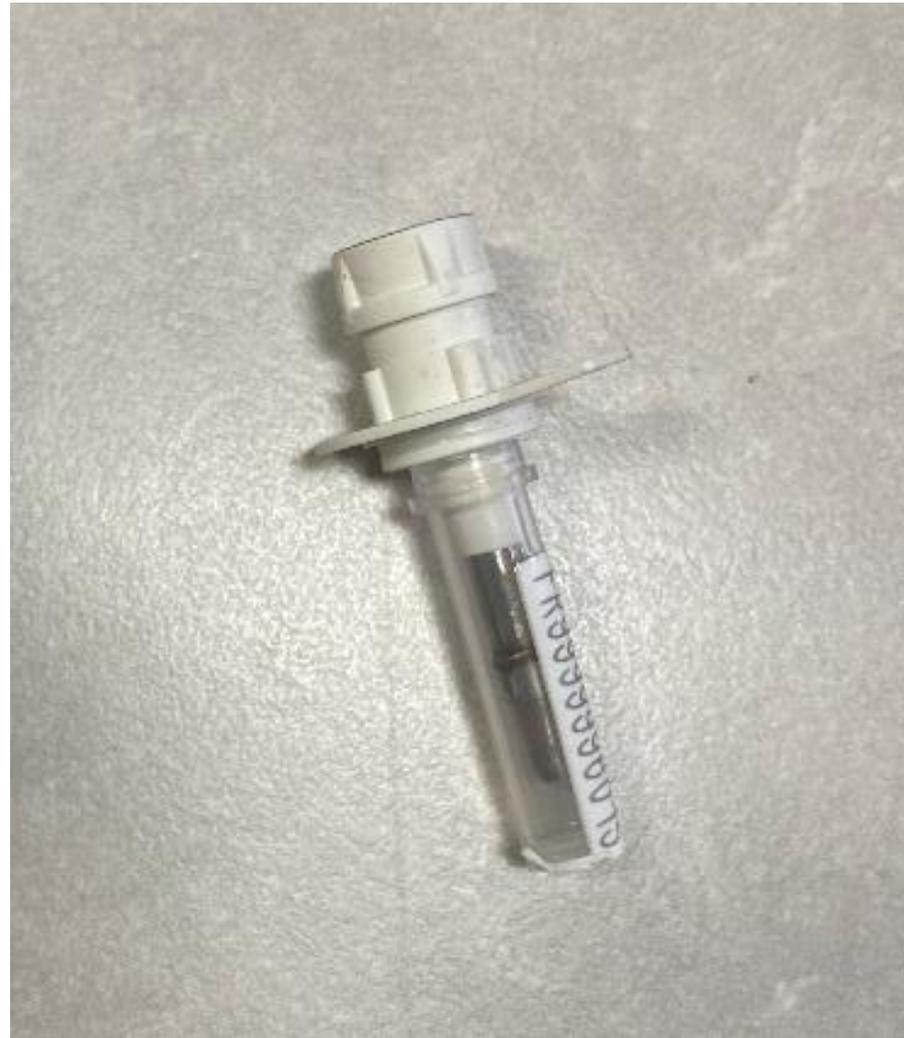

Ensemble : aiguille métallique (contenant l'échantillon de l'oreille du veau) et tube en plastique.



Mettre l'ensemble dans un sachet plastique fourni (un par échantillon).

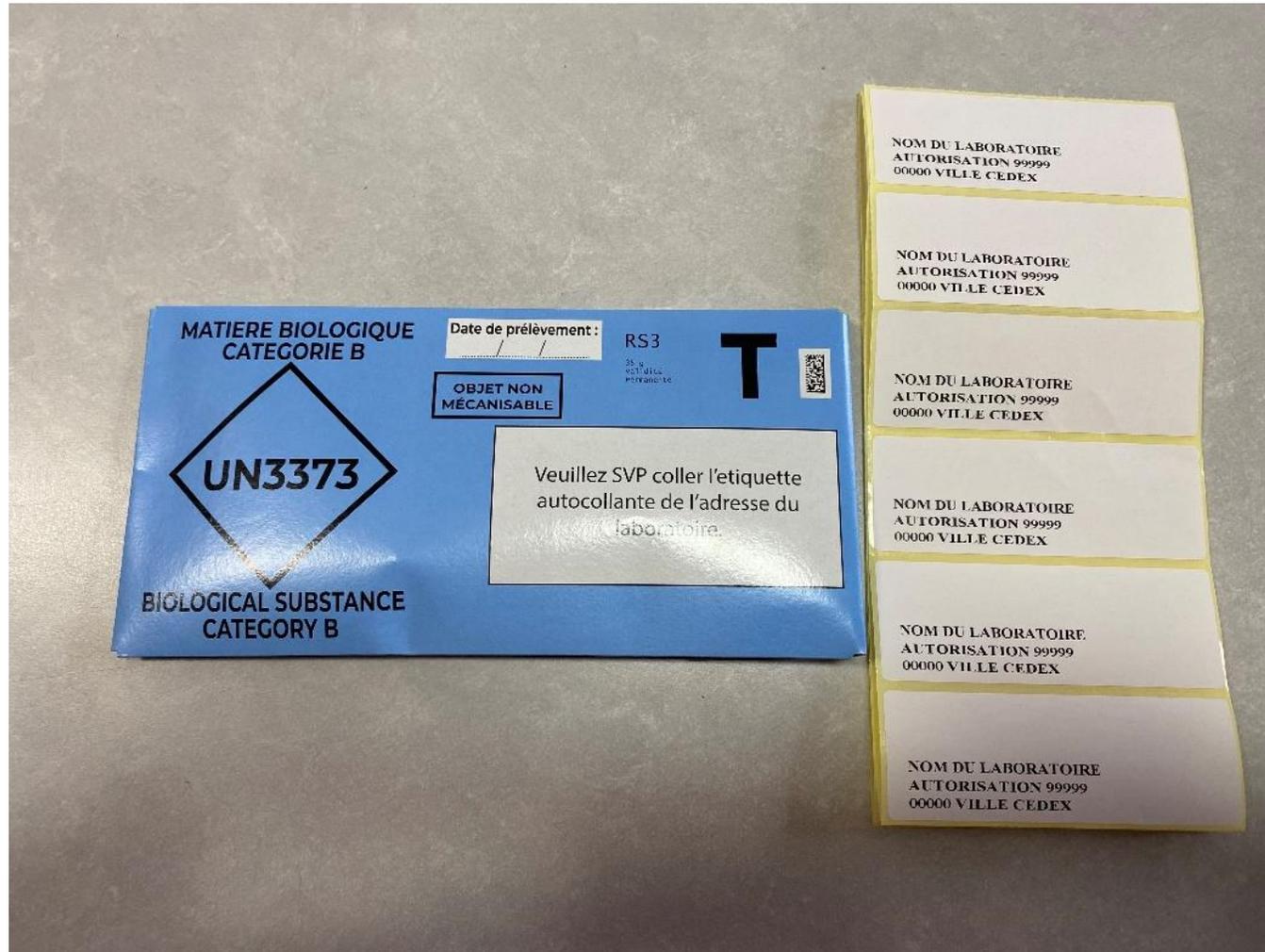


Mettre le sachet dans une enveloppe bleue.



Inscrire, la date du
bouclage.

Coller l'étiquette fournie
où figure l'adresse du
laboratoire.

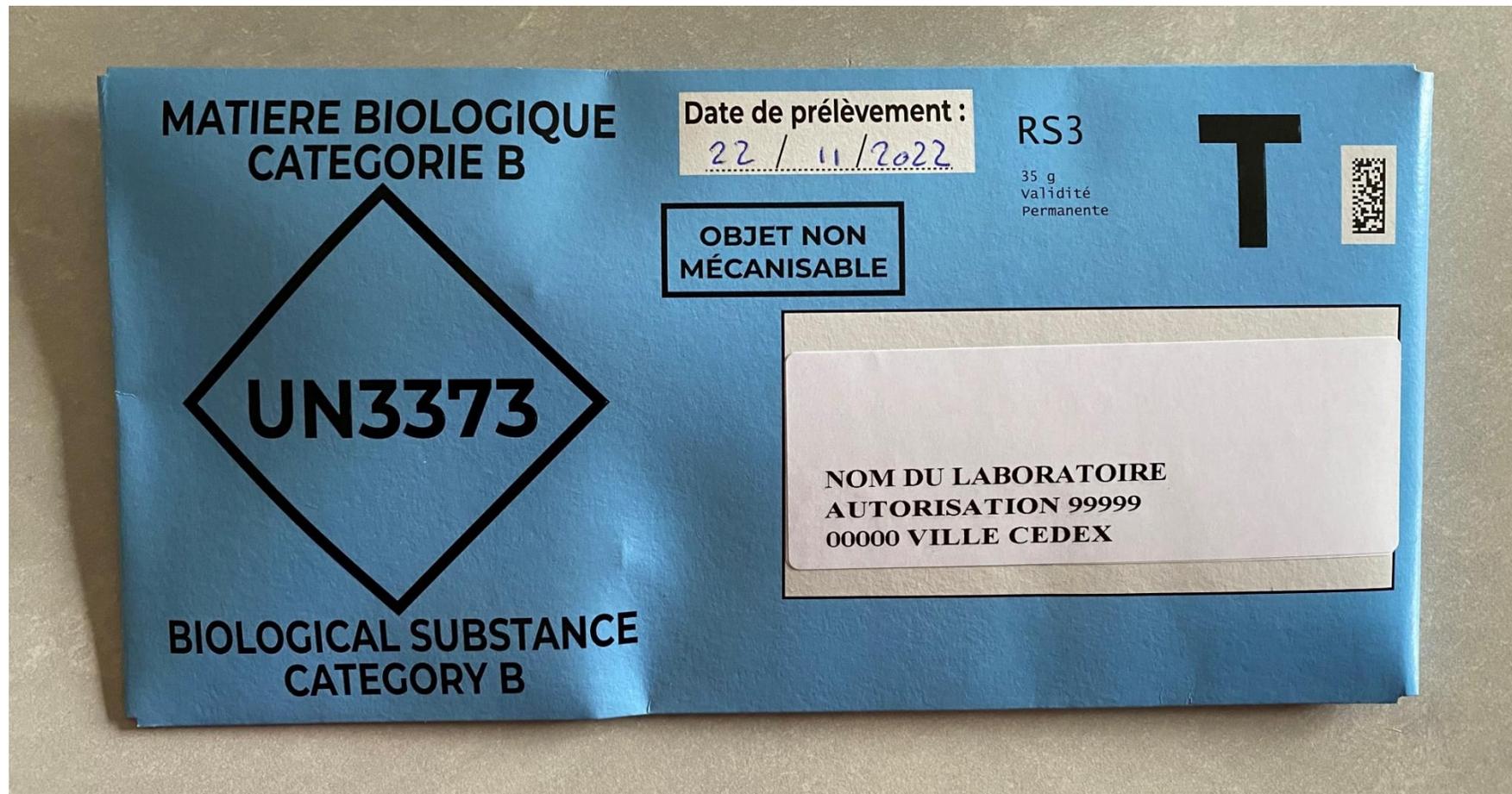

L'échantillon est maintenant prêt pour l'envoi. Ces enveloppes sont à déposer dans les boîtes aux lettres de la poste.

Il faut utiliser une enveloppe par échantillon. Si l'échantillon n'est pas envoyé tout de suite, il doit être conservé au réfrigérateur, il sera à envoyer sous trois jours maximum (72 h).