



Comment boucler les veaux avec le kit de prélèvement BVD ?

Contact GDS 64 : Mathilde ANDRE



GDS

Pyrénées-Atlantiques





Suite à la commande des boucles d'identifications, vous recevez un carton avec tous ces éléments. Dans ce diaporama, nous allons les détailler.

Attention : lors de votre première commande de boucles, pensez à commander la « pince pour prélèvement BVD ». Celle qui est utilisée pour les boucles classiques ne permet pas de réaliser le prélèvement.

Notice de pose boucle ULTRA Flex TST (FR16)

Réf. n° 74050623
Page 1/2



A LIRE IMPERATIVEMENT AVANT UTILISATION

Veillez suivre les recommandations suivantes afin de réaliser le prélèvement et poser les boucles de façon optimale.

Boucles de naissance N98 ou N10
avec biopsie auriculaire



1- Contenu de la commande :

A chaque paire de boucles de naissance, peuvent être associés :
- 1 enveloppe pré affranchie,
- 1 sachet mini-grip,
- 1 étiquette adresse laboratoire,
- Selon le département : 1 étiquette échantillon



Utiliser la pince spécifique pour poser l'ULTRA Flex TST :
Pince PRELEVEMENT TST jaune/noire (réf. 660 00 320)

2- Préparation de la boucle de prélèvement :

① Pièce mâle de prélèvement avec aiguille associée
② Tube de prélèvement

② Pièce femelle avec tête blanche

Toutes les pièces sont marquées au même numéro et présentées ensemble sur la barrette. NE PAS LES DISSOCIER.

2.1 Mise en place de la pièce mâle ① :



Appuyer sur le verrou situé sur le côté de la pince.
Insérer la pièce mâle ① jusqu'en butée et relâcher le verrou.
La pièce mâle est en place.

2.2 Mise en place de la pièce femelle ② :



Appuyer sur la pédale.
Insérer la pièce femelle ② jusqu'en butée.
Puis relâcher la pédale.
La pièce femelle est en place.

Ne pas retirer le capuchon vert, ni le détériorer avant la pose. Il doit rester intact en position plane pour réussir la pose et le prélèvement. Ne pas l'enfoncer à l'intérieur de la tête femelle en réalisant l'approche des deux pièces mâle et femelle pour vérifier l'alignement avant pose, si vous avez bien placé la pièce femelle en butée au bout de l'adaptateur/pédale, les pièces seront forcément alignées.



3- Mise en place de la boucle et prélèvement :

Contentionner l'animal et attendre qu'il se soit calmé.
L'animal ne doit pas bouger pendant la pose et le prélèvement.

La réussite de la pose et du prélèvement en dépendent.

La boucle ULTRA Flex TST doit être posée sur l'oreille droite.

Positionner la boucle entre les 2 nervures (représentées par les traits blancs), à un tiers de distance de la tête (cible jaune)



La partie femelle ② est placée à l'intérieur de l'oreille.



Serrer fermement, rapidement et jusqu'en butée complète la pince. Vous entendez l'encliquetage. Ouvrir la pince immédiatement après l'encliquetage.

Après la pose, pour vérifier la bonne tenue de la boucle, tenez chaque pièce avec une main et réalisez des rotations inversées entre ces deux pièces : cela vous permet de vérifier qu'elles sont bien encliquetées ensemble.

La boucle ULTRA Flex TST est posée définitivement à l'oreille, elle est reconnaissable à sa tête blanche.

L'aiguille de prélèvement reste sur la pince.



Réf. n° 740 50 623

1/2

Imprimé sur un papier recyclé


Vous recevez une fiche, recto-verso, expliquant comment utiliser le kit de prélèvement BVD.

À gauche, se trouve la boucle « classique ». Elle est à boucler avec la pince habituelle.

À droite, avec le bouton blanc, se trouve la boucle de prélèvement BVD. Elle sert à la fois à identifier l'animal et à prélever un échantillon de cartilage de l'oreille du veau, sur lequel une analyse sera faite. Cette analyse (antigénémie) permet de savoir si le veau est IPI ou non.

L'objet entouré  est le tube qui permet de protéger l'échantillon (cf diapo 9).



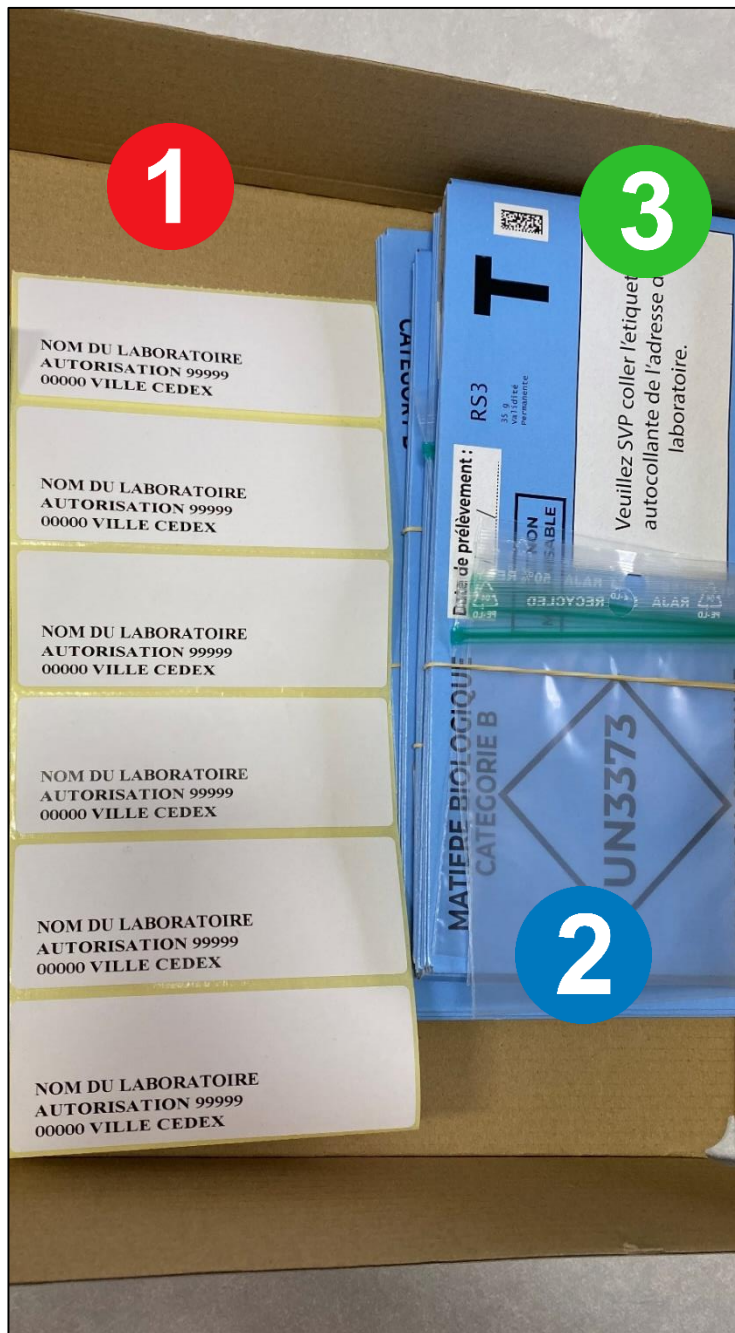

1

Étiquette avec l'adresse du laboratoire, à coller sur l'enveloppe blue, dans le rectangle blanc : « Veuillez SVP coller l'étiquette autocollante du laboratoire. » (cf. diapo 13).

2

Sachet plastique transparent dans lequel mettre l'échantillon (cf. diapo 11).

3

Enveloppe bleue, pour l'envoi de l'échantillon. Il faut utiliser une enveloppe par veau. Ces enveloppes sont à déposer dans les boîtes aux lettres de la poste (cf. diapo 14).



Pince de prélèvement BVD, à commander avec la première commande de boucles BVD.



Position de la boucle de prélèvement BVD sur la pince :

- Avant de l'oreille (grande boucle) sur la partie jaune de la pince ;
- Arrière de l'oreille (petite boucle) sur la partie noire de la pince.



Après le bouclage, l'aiguille métallique, avec, à l'intérieur, un échantillon de l'oreille du veau, reste sur la partie noire de la pince.



Prendre le tube en plastique correspondant au N° de l'animal.



Positionner le tube sur l'aiguille métallique.

Fermer la pince délicatement jusqu'à entendre un petit « click ».




Puis, appuyer sur le verrou entouré  pour sortir l'ensemble : aiguille métallique et tube en plastique.




Ensemble : aiguille métallique (contenant l'échantillon de l'oreille du veau) et tube en plastique.



Mettre l'ensemble dans un sachet plastique fourni (un par échantillon).

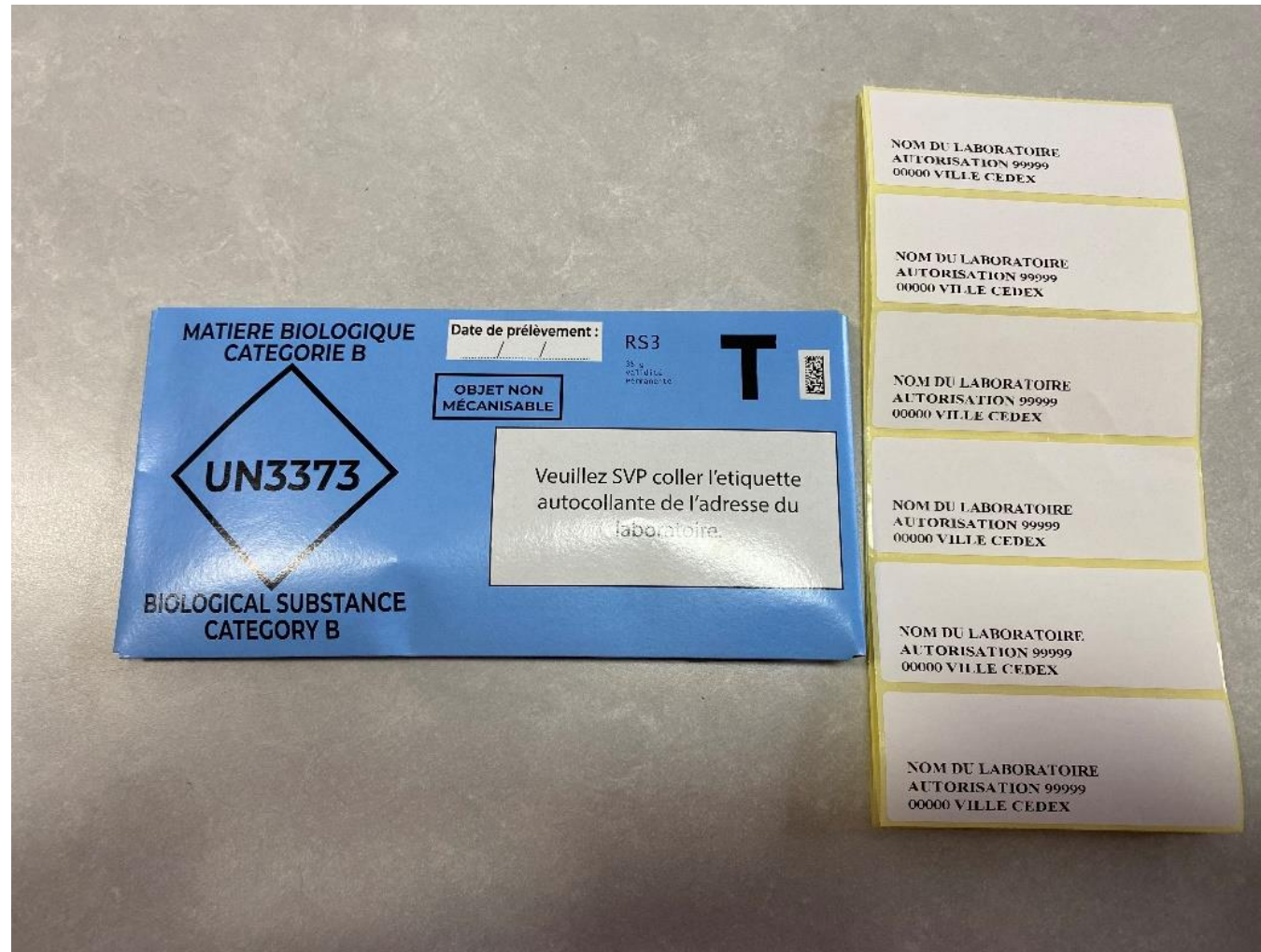


Mettre le sachet dans une enveloppe bleue.

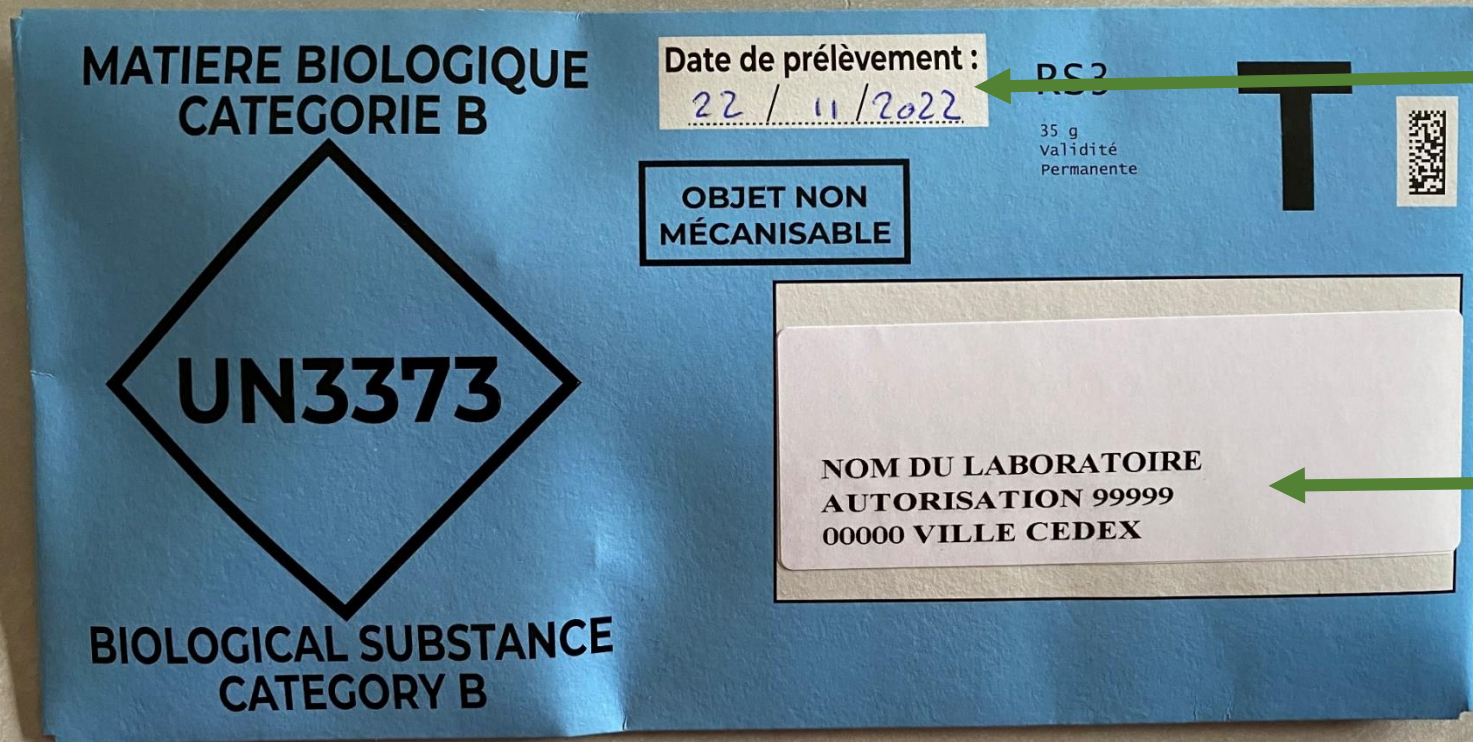

Inscrire, la date du bouclage.

Coller l'étiquette fournie où figure l'adresse du laboratoire.

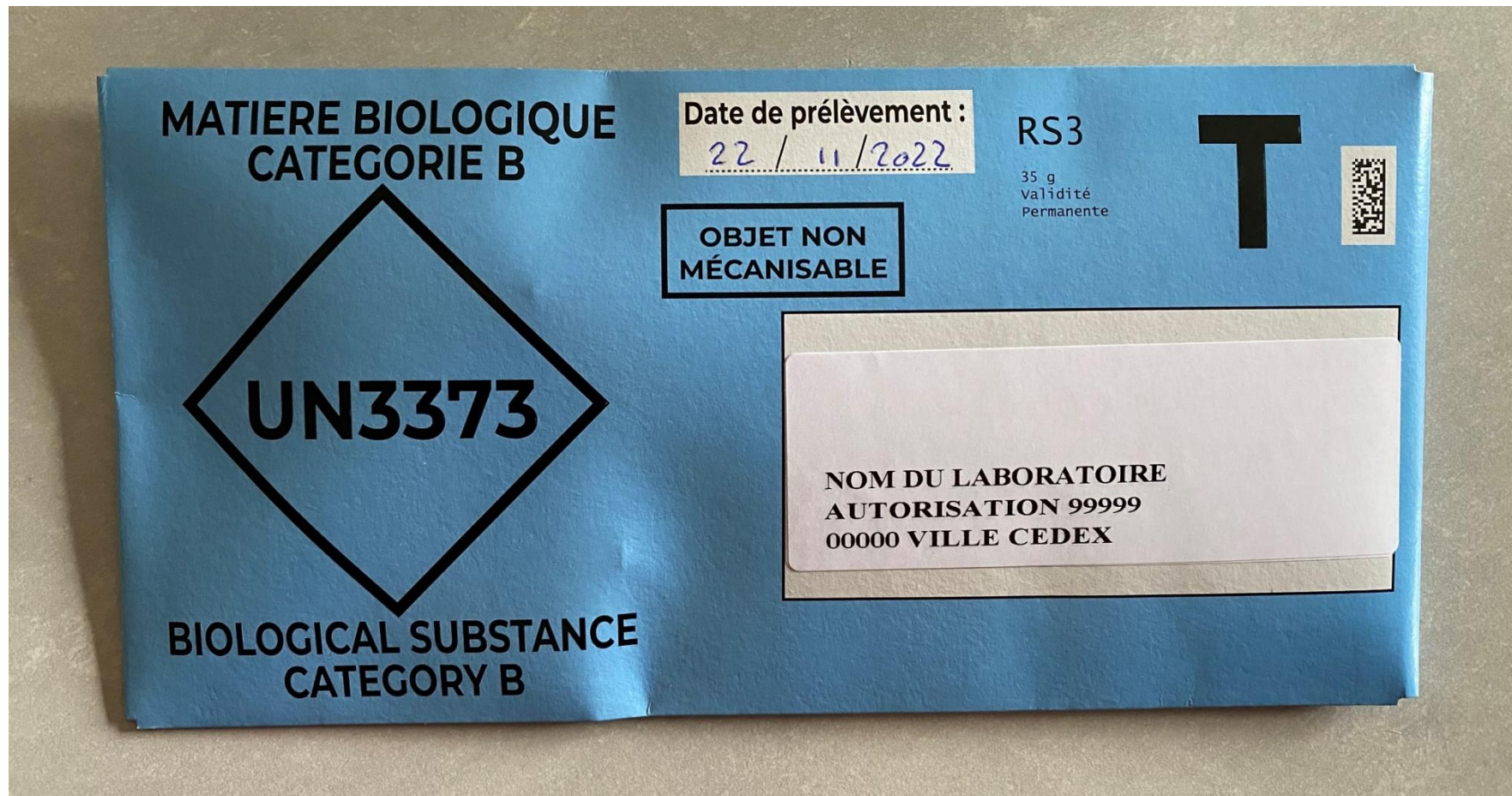

L'échantillon est maintenant prêt pour l'envoi. Ces enveloppes sont à déposer dans les boîtes aux lettres de la poste.

Il faut utiliser une enveloppe par échantillon. Si l'échantillon n'est pas envoyé tout de suite, il doit être conservé au réfrigérateur, il sera à envoyer sous trois jours maximum (72 h).